



## Bedienungsanleitung

Vakuform Systemüberwachung

VM 300

## Verwendungszweck

Die Vakuform Systemüberwachung VM 300 kontrolliert den Innendruck (Vakuum) von Vakuform Sitzschalen, Rollstuhlsitz- und Rückenkissen.

## Wichtig

Die Systemüberwachung ist nicht für große Systeme wie Vakuform- oder Vakucarelagerungssysteme geeignet.

## Hinweise für den Benutzer

Beim Aufleuchten der Leuchtdiode möglichst sofort einen Servicetechniker mit dem Wechsel der Batterien beauftragen.

Im Falle eines Defektes oder zum Batteriewechsel immer einen Servicetechniker bestellen. Niemals selbst das Gerät öffnen und die Batterien selbst wechseln

Säubern Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Niemals das Gerät mit Wasser reinigen.



Leuchtdiode

## Inbetriebnahme

Nach Einlegen der Batterien und Drücken des Resetbutton ist das Gerät betriebsbereit.

Durch Zusammenstecken der Ventile nimmt die Systemüberwachung VM 300 ihre Funktion auf.

Die Systemüberwachung besitzt keinen extra Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Dies soll ein versehentliches Ausschalten der Systemüberwachung verhindern.

Hinweis: Neuere Geräte besitzen einen Resetbutton außerhalb des Gehäuses (roter Taster)



Arretierungshülse

## Trennen der Ventile

Durch zurückziehen der Arretierungshülse werden die Ventile von einander getrennt.




## Im Einsatz

Die Systemüberwachung misst permanent das Vakuum der Polster. Sinkt das Vakuum unterhalb des voreingestellten Grenzwertes ab, wird die Luft durch eine Pumpe evakuiert. Nachdem der obere Grenzwert erreicht wurde, wird die Pumpe abgeschaltet.

## Hinweise für den Servicetechniker

Immer alle Batterien gleichzeitig wechseln.  
Beim Einsetzen der neuen Batterien ist auf die richtige Polung (+ -) zu achten.  
Niemals das Gerät mit alten und neuen Batterien gemischt betreiben.  
Nach dem Wechseln der Batterien den Resetbutton kurz drücken.

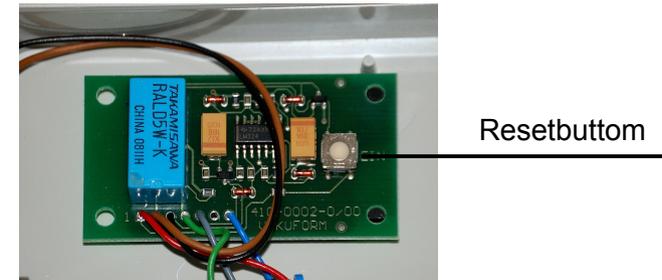

## Technische Daten:

Größe	200 x 150 x 38 mm
Stromversorgung	9Volt, batteriebetrieben
Batterien:	Energizer Alkaline Ultraplus 9V
Anzahl:	3 Stück
Pneumatischer Anschluss:	Schnellverschlussstecker NW 2.7
Einstellbereich Vakumeter:	von -120 bis -250 mbar
Betriebsdauer:	bis zu 6 Monate

