



Pflegehinweis für VAKUFORM® Produkte

Bezüglich der Pflege unserer Produkte geben wir Ihnen folgende Pflegehinweise:

1. Die Produkte sind bis 60° handwaschbar.
2. Die Produkte können mit handelsüblichem Desinfektionsmittel desinfiziert werden.
3. Die Produkte nach der Wäsche an der Luft trocknen lassen.

ACHTUNG:

Das Oberflächenmaterial unserer VAKUFORM® Produkte kann durch Feuer oder spitze Gegenstände beschädigt werden, was zum Verlust in der Dichtigkeit des Materials führen kann.

Für derartige Schäden können wir keine Haftung übernehmen.

Wir empfehlen Ihnen, die Produkte nicht der Belastung durch Maschinenwäsche, Trockenschleudern oder große Hitzeeinwirkung auszusetzen.

Unter großer Hitzeeinwirkung kann es - physikalisch bedingt - zur Erweichung Ihres Vakuumpolsters kommen (z.B. im Hochsommer durch längere Aufbewahrung im geschlossenen Kfz oder lange, direkte Sonnenbestrahlung). Dies kann im Extremfall zum Verlust der Formstabilität führen.

Ein derartiger Formverlust bedeutet keine Ermüdung oder Beschädigung des Materials.

Bei starker Erwärmung dehnen sich natürlicherweise sowohl das Füllmaterial, als auch die verbleibende Restluft im Polster aus. Dadurch kann das Material erweichen. Sobald die Temperatur sinkt, erhält das Polster jedoch wieder seine ursprüngliche Stabilität zurück.

Um einer unerwünschten Formveränderung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, das System nicht über einen längeren Zeitraum großer Hitze auszusetzen.

Sollte es dennoch auf die beschriebene Weise zu einer Änderung der Druckverhältnisse im System kommen, können Sie diese durch absaugen der Luft einfach mit der Pumpe regulieren.

Belüften Sie die Polster nicht unbeaufsichtigt mit einer Elektropumpe. Die anhaltende Luftzufuhr bläst das Polster auf und kann schließlich zum Reißen der Klebenähte führen.

Made in Germany

Wir fertigen für Sie unsere Artikel in unserer Werkstatt von Hand an.

Für die Herstellung dieser Produkte verwenden wir nur hochwertige Materialien von überwiegend deutschen Zulieferern. Dadurch garantieren wir Ihnen eine gleichbleibend hochwertige Fertigungsqualität.

Ihr VAKUFORM® Team



VAKUFORM GmbH
Vakuum- und Luftkissentechnologie
Weiterstädter Landstraße 13
D – 64291 Darmstadt
www.vakuform-reha.de