

„Raus aus dem Bett!“

Aufenthalt außerhalb des Bettes möglich machen

Die Lagerung und Positionierung schwerstbehinderter Personen stellt pflegende und betreuende Personen erfahrungsgemäß vor schwierige Herausforderungen. Mit anderen Worten: "Was kann ich tun um dem Patienten zumindest zeitweise einen Aufenthalt außerhalb des Bettes zu ermöglichen".

Meistens bieten die zur Verfügung stehenden Rollstühle / Multifunktionsstühle nicht den notwendigen Halt. Auch maßgefertigte Versorgungen garantieren oft nicht die optimale Lösung, da sich die Bedürfnisse der behinderten Menschen häufig verändern.

Automatische Anpassung an die Körperform

Vakuform Systeme sind über eine einfache Veränderbarkeit in der Lage sich der jeweiligen Situation des Patienten anzupassen und so stufenweise eine individuelle, sichere Positionierung im Rollstuhl zu ermöglichen. Patienten die bisher nur im Bett liegen mussten, können hierdurch in einen Rollstuhl gesetzt und mobilisiert werden. Das

Wirkungsprinzip der Produkte ist einfach: Das Kissen besteht aus einem elastischen Neoprenmantel der mit feinen Styroporkügelchen gefüllt und luftdicht versiegelt ist. Im belüfteten Zustand bildet es eine weiche und bequeme Basis in die der Patient einsinkt. Das Vakuform Kissen passt sich dabei automatisch der Körperform an. Über das Herausziehen der Luft und weiteres Anformen entsteht bei optimaler Druckverteilung ein sicherer, druckfreier Halt. So kann der Nutzer langsam in eine halbliegende oder gar aufrechte Sitzposition gebracht werden.

Spezielle Entwicklung für Wachkomapatienten

Das speziell für Wachkoma- und andere Patienten mit wechselndem Tonus entwickelte Vakuform Lagerungssystem bietet diese Möglichkeiten in besonderem Maße. Es kann in jeden vorhandenen Multifunktionsstuhl nachgerüstet werden und bietet eine wenn nötig schnell veränderbare und somit sehr flexible Alternative zu bisherigen Versorgungskonzepten. Alle

Vakuform Systeme werden von den Krankenkassen seit vielen Jahren übernommen und können vor Ort erprobt werden.

Die Beratung und Erprobung bietet die Firma **VAKUFORM** bundesweit Partnern bundesweit mit Ihren Partnern an.



VAKUFORM GmbH

Weiterstädter Landstraße 13
64291 Darmstadt
Tel. 0049 (0)6151 9183618
Fax 0049 (0)6151 9183819
Mobil 0049 (0)177 8183618
www.vakuform-reha.de



VAKUFORM

VAKUFORM – Von Kopf bis Fuß perfekt gelagert.

Lernen Sie uns kennen: Telefon 06151 9183610
kontakt@vakuform-reha.de
www.vakuform-reha.de

VAKUFORM®